

STOMATOVIS®

Zaštitna pasta za usnu duplju

Indikacije:

Zaštitna prijanjajuća barijera za tretman ulceroznih promena nastalih kao posledica aftozne upale sluznice usne duplje.

Sastav:

Mineralno ulje, vazelin, PVM/MA Ca/Na so, natrijum karboksimetil celuloza, ksilitol, D-pantenol, karboksimetil beta-glukan, ekstrakt Aloe Vera, sluzi crnog sleza, tokoferil-acetat, dikalijum-glicirizinat, vitamin A palmitat, cink-oksidi, hlorbutanol, bakarni kompleks hlorofila, arome.

Primena:

Malu količinu proizvoda naneti direktno na promenu, uz primenu blagog pritiska. Ostaviti da deluje najmanje 20 sekundi, zbog prijanjajućeg efekta, izbegavajući kontakt sa okolnim tkivom. Primenu ponoviti po potrebi.

Mere opreza:

- Ne primenjivati pastu direktno iz tube.
- Ne primenjivati u slučaju poznate preosetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda.
- U slučaju neželjenih reakcija prekinuti primenu i konsultovati lekara.
- Čvrsto zatvoriti tubu nakon primene.
- Ne koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja.
- Proizvod čuvati uvek udaljeno od izvora toplote i domašaja dece.
- Gutanje malih količina proizvoda, ukoliko nastupi, nije štetno po zdravlje.

Proizvođač:

DMG Italia Srl, Via Laurentina, km 26,700 Pomezia, Rim, Italija

Ovlašćeni predstavnik:

Sibex Line doo Beograd, Trešnjinog cveta 1, 11 070 Beograd, Republika Srbija www.sibex.rs

Broj Rešenja o registraciji:

515-02-01234-19-002 od 25.06.2019.

Datum poslednje revizije uputstva:

1 iz 02/03/2010

20FG988 2-11/07/2019

