

# STOMATOVIS®

## Rastvor za usnu duplju

Molimo vas detaljno proučite uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod.

### 1. Šta je Stomatovis® rastvor za usnu duplju i čemu je namenjen

Stomatovis® rastvor za usnu duplju je medicinsko sredstvo namenjeno za zaštitu oralne sluznice, pogodan za prevenciju simptoma povezanih sa upalama sluznice usne duplje različitog porekla, kao i upalama desni. Pomaže u održavanju vlažnosti i neguje usnu duplju.

### 2. Šta treba da znate pre nego što primenite Stomatovis® rastvor za usnu duplju

Ne koristite Stomatovis® rastvor za usnu duplju u slučaju poznate preosetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda (navedeno pod br.6)

### 3. Kako koristiti Stomatovis® rastvor za usnu duplju

Ispirajte usnu duplju sa 15-20ml nerazblaženog rastvora najmanje 60 sekundi. Ne ispirajte vodom nakon toga. Ponovite primenu 1-3 puta dnevno. Operite oprezno mernu čašu posle svakog korišćenja i ne delite sa drugima.

### 4. Upozorenja

- U slučaju neželjenih reakcija prekinuti primenu i konsultovati lekara
- Ne prekoračivati preporučenu dozu i slediti uputstva
- Ne gutati
- Pre prve upotrebe proveriti da li je boca neotvarana
- Ne koristiti ovaj proizvod nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na neoštećen i propisno čuvan proizvod.
- Zbog prirode sastojaka rastvor može postati zamućen; ta pojava ne utiče na kvalitet proizvoda

### 5. Kako da čuvate Stomatovis® rastvor za usnu duplju

- Čuvati van domašaja i vidokruga dece
- Zatvoriti čvrsto bocu nakon upotrebe
- Čuvati na sobnoj temperaturi, udaljeno od izvora toplote

### 6. Dodatne informacije

**Sastav:** Prečišćena voda, ksilitol, ekstrakt crnog sleza, biljni glicerol, dikalijum glicirizinat, karboksimetil beta-glukan, Na-bikarbonat, hlorbutanol, kopolimer PVM/MA, Na-N-hidroksimetilglicinat, hidrogenizovano ricinusovo ulje 40 OE, acesulfam K, arome, zelena boja (E102-E131-E514).

**Pakovanje:** 200 ml boca sa mernom čašom

#### Proizvođač:

DMG Italia Srl, Via Laurentina, km 26,700 Pomezia, Rim, Italija

#### Distributer i nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava ALIMS:

Sibex Line doo Beograd, Trešnjinog cveta 1, 11070 Beograd, Republika Srbija, www.sibex.rs

#### Broj i datum Rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava ALIMS:

515-02-00141-18-002 od 15.03.2019.

