

NARIVENT®

Sprej za nos

Protiv otoka nosne sluznice

Indikacije:

Medicinsko sredstvo sa osmotskom aktivnošću koje deluje na smanjenje otoka i lokalnog zapaljenja nosne sluznice. Namenjen je:

- Smanjenju nazalne opstrukcije (otežanog disanja na nos) nastalog usled uvećanja nosnih konhi ili kod pacijenata sa specifičnim (alergijskim) ili nespecifičnim (nealergijskim) zapaljenjem sluznice nosa.
- Tretmanu otoka koji nastaje kao posledica zapaljenskog procesa kod hronično uvećanog "trećeg" krajnika, kod akutnog i hroničnog rinosinuzitisa (zapaljenja sluznice nosa i sinusa).
- Tretmanu i prevenciji ponovnog pojavljivanja nosnih polipa, kao i nakon izvršene hirurške intervencije.
- Tretmanu različitih poremećaja sluznice nosa i sinusa, u periodu pre i nakon hirurške intervencije

Sastav:

Manitol, glicerol, dikalijum glicirizinat, PEG/PPG kopolimer, dinatrijum EDTA, natrijum N-hidroksimetil glicinat, polisorbitat 20, kalijum sorbat, natrijum hidrat, prečišćena voda, prirodne arome.

Način korišćenja:

Uklonite zaštitnu kapicu, naslonite palac na dno flašice, kažiprst i srednji prst postavite na krilca pumpe i pritisnite na dole, potom otpustite. Ponovite ovaj postupak sve dok ne izađe prvi mlaz spreja. Blago nagnite glavu, prsnite sprej u nozdrvu i pritom nemojte disati.

Neposredno pre hirurške intervencije sprej koristiti samo ako je potvrđeno da pacijent nije preosetljiv ili netolerantan na sastojke spreja.

Odrasli i deca: 2 doze u svaku nozdrvu 2 puta dnevno ili prema savetu lekara.

Neželjene reakcije:

Nisu prijavljene neželjene reakcije.

Upozorenje:

- Proizvod može da izazove prolazni osećaj svraba u nosu i blago kihanje tokom prvih nekoliko aplikacija.
- Specifičan mehanizam dejstva Narivent spreja može da izazove privremenu osmotsku rinoreju (curenje iz nosa) nakon aplikacije.
- U slučaju pre-hirurške primene osigurati da nema poznate preosetljivosti ili intolerancije na proizvod.
- U slučaju preosetljivosti na neki od sastojaka, nemojte koristiti ovaj proizvod.
- U slučaju pojave neželjenih reakcija, prekinite korišćenje i konsultujte lekara.
- Izbegavajte kontakt sa očima.
- Nakon upotrebe, dobro zatvorite bočicu.
- Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja utisnutog na pakovanju.
- Držati dalje od izvora toplote.
- Držati van domašaja dece.
- Preporučljivo je da samo jedno lice upotrebljava proizvod.
- Nemojte gutati.
- Nakon upotrebe, nemojte bacati bočicu u okolinu.

Proizvođač:

DMG Italia Srl

Via Laurentina, km 26.700-00071 Pomezia, Rim, Italija

Ovlašćeni predstavnik:

Sibex Line doo Beograd, Trešnjinog cveta 1, 11 070
Beograd, Republika Srbija, www.sibex.rs



Broj Rešenja o registraciji: 515-02-01359-19-002 od 10.07.2019.

Rev. 4 iz 20/09/2012 20FG047F-A1-01-05/02/2019