

Pepsino™

Oralni sprej

Molimo vas detaljno proučite uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod.

1. Šta je PEPSINO™ i čemu je namenjen

PEPSINO™ je medicinsko sredstvo sa mehaničkim efektom, indikovano za smanjenje simptoma na nivou ždrela, povezanih sa gastroezofagealnim refluksom, kao što su: globus pharyngeus (osećaj stranog tela u grlu), kašalj, potreba za „pročišćavanjem“ grla, osećaj suvoće ili iritacija na nivou ždrela i tome slično.

PEPSINO™ takođe može obložiti sluznicu ždrela, pomažući procese obnove sluznice.

Za lokalnu primenu u usnoj duplji.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite PEPSINO™

- Ne koristite PEPSINO™ u slučaju poznate preosetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda (navedeno pod br.6)
- Konsultujte se sa svojim lekarom pre primene preparata PEPSINO™ ukoliko ste u drugom stanju ili dojite.

3. Kako da primenite PEPSINO™

- Ispravite nastavak na sprej-bočici.
- Kod prve primene proizvoda pritisnite pumpicu van usne duplje sve dok ne dobijete ujednačeni mlaz spreja.
- Nastavak sprej-bočice stavite u usnu duplju i usmerite raspršivač ka grlu čvrsto pritiskajući pumpicu.
- Raspršite dve doze 3-4 puta dnevno, ili prema savetu lekara.

4. Upozorenja

- Konsultovati lekara ukoliko, i pored primene spreja, simptomi i dalje postoje.
- U slučaju neželjenih reakcija prekinuti primenu i konsultovati lekara.
- Izbegavati kontakt sa očima.
- Ne prekoračivati preporučenu dozu i slediti uputstva.
- Pre primene potvrditi da je pakovanje neoštećeno.
- Ne koristiti ovaj proizvod nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
- Rok upotrebe se odnosi na neoštećen i propisno čuvan proizvod.

5. Kako da čuvate PEPSINO™

- Čuvati van domašaja i vidokruga dece
- Čuvati na sobnoj temperaturi, udaljeno od izvora toplote.

6. Dodatne informacije

Sastojci: prečišćena voda, fruktoza, tečni ekstrakt Camellia sinensis (zeleni čaj), magnezijum alginat, Na-benzoat, K-sorbat, Na-hijaluronat, di-Na-EDTA, K-citrat, limunska kiselina, arome.

Pakovanje: 30ml bočica, oralni sprej

Proizvođač:

DMG Italia Srl

Via Laurentina, km 26,700 Pomezia, Rim, Italija

Nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava ALIMIS:

Sibex Line doo Beograd Trešnjinog cveta 1, 11070 Beograd, Republika Srbija, www.sibex.rs

Broj i datum Rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava ALIMIS:

515-02-00143-18-002 od 15.03.2019.



20FG990_2-18-07-2019

Reviz. 06/2017