

RINOPANTEINA®

Sprej za nos sa vitaminom A i vitaminom E

Molimo vas detaljno pročitajte uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod.

1. Šta je Rinopanteina® sprej za nos i čemu je namenjen

Rinopanteina® sprej za nos je medicinsko sredstvo koje održava vlažnost nosne sluznice, pomažući u procesu njenog obnavljanja.

Rinopanteina® sprej za nos se može primeniti u slučajevima suve i/ili atrofirane nosne sluznice, stanja nastalih usled određenih faktora iz okruženja, primene sprejova za nos, inhalacione terapije ili privremenih patologija (npr. zapaljenje sluznice nosa usled neadekvatne primene drugih lokalnih preparata za nos, kod alergijske kijavice, ozene);

2. Šta treba da znate pre nego što primenite Rinopanteina® sprej za nos?

Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju poznate preosetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda (navedeno pod brojem 6)

3. Kako da upotrebljavate Rinopanteina® sprej za nos?

Uklonite zaštitnu kapicu. Naslonite palac na dno flašice, kažiprst i srednji prst postavite na krilca pumpice i pritisnite na dole, potom otpustite. Ponovite ovaj postupak sve dok ne izađe prvi mlaz spreja. Blago nagnite glavu unapred, i nakon što polako izdahnete vazduh, prsnite sprej u nozdrvu. Udahnite i prstom druge ruke zatvorite nozdrvu u koju nije ubrizgan sprej.

Preporučuje se primena po dve doze u svaku nozdrvu dva puta dnevno, ili prema savetu lekara.

4. Upozorenja

- U slučaju neželjenih reakcija prekinuti primenu i konsultovati lekara
- Pre prve upotrebe proveriti da li su kutija i sprej netaknuti
- Ne koristiti ovaj proizvod nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na neotvoren i odgovarajuće čuvan proizvod
- Ne gutati sadržaj
- Izbegavati kontakt sa očima

5. Kako čuvati Rinopanteina® sprej za nos?

- Držati van domašaja i vidokruga dece
- Zatvoriti bočicu nakon primene
- Poželjno je čuvati proizvod na sobnoj temperaturi

6. Detaljnije informacije

Sastav: D-pantenol (1%), vitamin E acetat (0,20%), vitamin A palmitat (0,05%), hidrogenizovano ricinusovo ulje 40 OE, dinatrijum EDTA, natrijum-N-hidroksimetil glicinat, kalijum-sorbat, ksantan-guma, prirodne arome, izotonični puferski rastvor pH 7,2.

Pakovanje:

Bočica 20ml

Proizvođač:

DMG Italia Srl

Via Laurentina, km 26.700 – 00071 Pomezia, Rim – Italija

Nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava:

Sibex Line doo Beograd

Trešnjinog cveta 1, 11 070 Beograd - Srbija

Broj i datum Rešenja o upisu u Registar medicinskih sredstava: 515-02-02211-17-001 od 14.12.2017.



20FG927-A1 4-21/01/2020