

EMOFIX[®]

Mast za zaustavljanje krvarenja

Molimo vas detaljno pročitajte uputstvo pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod.

1. Šta je Emofix[®] mast za zaustavljanje krvarenja i čemu je namenjena?

Emofix je hemostatska mast sa funkcijom barijere indikovana za zaustavljanje i prevenciju epizoda krvarenja na koži i sluzokoži, kao što su, na primer, esencijalna, čak i mala i traumatska epistaksa (krvarenje iz nosa), male rane na koži itd.

2. Šta treba da znate pre nego što primenite Emofix[®] mast za zaustavljanje krvarenja?

Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju poznate preosetljivosti na bilo koji sastojak proizvoda (navedeno pod brojem 6).

3. Kako da upotrebljavate Emofix[®] mast za zaustavljanje krvarenja?

Da bi se zaustavila epizoda krvarenja: naneti dovoljnu količinu masti da se pokrije povređena regija.

Da bi se sprečilo ponavljanje epistakse: nanositi proizvod dva puta dnevno najmanje dve nedelje posle akutne epizode ili po savetu lekara.

Upotreba aplikatora, koji je uključen u pakovanje, preporučuje se u slučaju primene na nosnoj sluznici.

Pažljivo očistite aplikator nakon svake aplikacije i izbegavajte deljenje.

4. Upozorenja

- U slučaju neželjenih reakcija prekinuti primenu i konsultovati lekara.
- Osećaj žarenja, svrab i curenje iz nosa mogu se pojaviti u toku prvih dana tretmana i obično nestaju tokom terapije. Ako se to ne desi, prekinite tretman i konsultujte lekara.
- Pre prve upotrebe proveriti da li je pakovanje netaknuto.
- Ne koristiti ovaj proizvod nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na neotvoren i odgovarajuće čuvan proizvod.

5. Kako čuvati Emofix[®] mast za zaustavljanje krvarenja?

- Držati van domašaja i vidokruga dece.
- Nakon upotrebe dobro zatvorite tubu.
- Emofix[®] čuvajte na sobnoj temperaturi i ne iznad 30 °C. Ako se proizvod čuva na različitim temperaturama može da varira u kompaktnosti, bez pada kvaliteta. Jednostavnim držanjem na sobnoj temperaturi, Emofix[®] će povratiti originalnu čvrstoću.

6. Dodatne informacije

Sastojci: Mešavina zasićenih masnih kiselina, ekstrakt proteina kvasca, fosfatidilholin, tokoferil acetat, pčelinji vosak, sojino ulje, stearyl alkohol, kalcijum, kalijum, magnezijum hlorid, gliceril monostearat, metil i propil p-hidroksibenzoat, BHT.

Pakovanje:

Tuba 30g sa aplikatorom.

Datum poslednje revizije uputstva: 03/2016

Proizvođač:

DMG Italia Srl

Via Laurentina, km 26.700 - 00071 Pomezia, Rim - Italy

Ovlašćeni predstavnik:

Sibex Line doo Beograd, Trešnjinog cveta 1, 11070 Beograd, Republika Srbija, www.sibex.rs

Broj Rešenja o registraciji:

000930305 2024 59010 009 000 515 059 04 003 od 17.04.2024.

Rev. 01 09/2024



30FG189-A1 1-25/09/2024